



eInserts™ XML


Nuevos eInserts XML para los sistemas Abbott ARCHITECT®

Invierta menos tiempo y evite los errores que se producen en la introducción manual de los valores del control de la calidad, usando eInserts™ XML de la empresa Bio-Rad. Los datos se importarán directamente, de una forma rápida y segura, en su analizador Abbott ARCHITECT®, utilizando un formato de intercambio de datos estándar (XML).

- **Cargue fácilmente los valores de los insert de los controles de la calidad.**
- **Mejore la eficiencia en su laboratorio.**
- **Elimine los errores en la entrada manual de los datos.**

Entre en xml.qcnet.com

Ahorre tiempo y evite errores usando eInserts™ XML

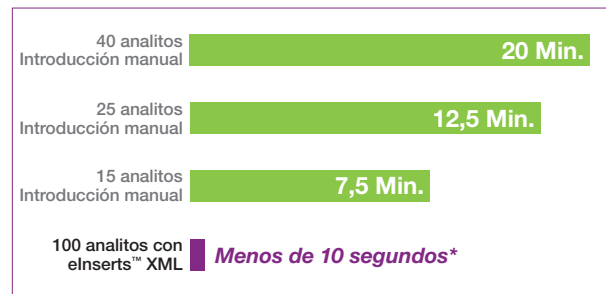

* Tiempo estimado de transferencia en ARCHITECT® desde una memoria USB o CD-ROM.

Gráfica basada en una velocidad de entrada manual. No se incluye el tiempo adicional de errores cometidos durante esta entrada de datos.

BIO-RAD

¿Cómo cargar los valores en su sistema ARCHITECT®?

Averigüe la versión del software de su ARCHITECT®.

Si usted no sabe si su analizador Abbott ARCHITECT® system tiene la versión 7.0, póngase en contacto con su representante de Abbott para obtener ayuda.

Si su instrumento Abbott ARCHITECT® ya tiene la versión 7.0.

Ir a xml.qcnet.com para ver los controles de calidad de Bio-Rad disponibles para elInserts XML. Los productos de control de la calidad se van añadiendo continuamente, por ello, para obtener la información más actualizada, se recomienda visitar la página con frecuencia.



Se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios valores medios e intervalos aceptables, tomando los valores proporcionados por Bio-Rad sólo como guía. No realice ningún cambio en el texto ni en los valores del archivo XML. Si lo hace, el archivo se vuelve inutilizable. Bio-Rad no se hace responsable si se realiza algún cambio en el archivo XML después de cargarlo. Las actualizaciones de datos de los lotes que se hayan cargado previamente no se deben hacer por vía electrónica, sino que se deberán introducir manualmente en el sistema.

Instrucciones para usar elInserts™ XML

Comience a usar xml.QCNet.com

1

Inicio de sesión en QCNet™

Entre en el siguiente enlace:
xml.qcnet.com

Inicie sesión en QCNet™: Introduzca su nombre de usuario y contraseña, si los tiene, o regístrese como nuevo usuario.

2

Selección de datos

1. Seleccione Instrumento / Producto / Lote.
2. Haga clic en generar XML.
3. Escoja OK.
4. Seleccione guardar (Puede guardar sus archivos en CD o USB).

3

Cargar datos

Las valoraciones del insert están listas para cargarse. Consulte las instrucciones de importación en el manual de operaciones de ARCHITECT® System.



La participación en el programa de intercomparación entre laboratorios Unity™, le ayudará a mejorar la calidad en los resultados de su laboratorio y a cumplir con los requisitos reglamentarios y de acreditación en todo el mundo. También puede suscribirse a una de nuestras soluciones para la gestión de datos de control de la calidad Unity™, destinadas a mejorar la eficacia en el proceso del control estadístico. Descubra el poder de Unity™ en www.QCNet.com/es/.

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories

Para más información, contacte con Bio-Rad o visite la página xml.qcnet.com

Clinical
Diagnostics Group

Website www.bio-rad.com/diagnostics U.S. 1-800-2BIO-RAD Australia 61-2-9914-2800 Austria 43-1-877-8901 Belgium 32-9-385-5511 Brazil 5521-3237-9400 Canada 1-514-334-4372 China 86-21-64260808 Czech Republic 420-241-430-532 Denmark +45-4452-1000 Finland 358-9-804-22-00 France 33-1-47-95-60-00 Germany +49-(0)89-318-840 Greece 30-210-7774396 Hong Kong 852-2789-3300 Hungary +36-1-459-6100 India 1-800-180-1224 Israel 972-3-9636050 Italy +39-02-216091 Japan 81-3-6361-7070 Korea 82-2-3473-4460 Mexico +52 (55) 5488-7670 The Netherlands +31-318-540666 New Zealand 64-9-415-2280 Norway 47-23-38-41-30 Poland 48-22-3319999 Portugal 351-21-472-7700 Russia 7-495-721-14-04 Singapore 65-6415-3170 South Africa 27-11-442-85-08 Spain 34-91-590-5200 Sweden 46-8-555-127-00 Switzerland 41-61-717-95-55 Thailand 662-651-8311 United Kingdom +44-(0)20-8328-2000